

Приложение № 21
к Приказу ГБОУ Школа № 1512 № A-12/2
от «19» сентября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной
организации
ГБОУ Школа № 1512

Е.С. Огиенко Е.С. Огиенко
«19» сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школа № 1512
П.В. Комзолов
«19» сентября 2017 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
и технике безопасности для персонала, работающего
с ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями открытого типа**

ИОТ 021-2017

1. Общие требования безопасности

К эксплуатации ультрафиолетовых бактерицидных облучателей открытого типа (далее – облучатель) допускается персонал, изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации и прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок.

Эксплуатация облучателя допускается в помещениях высотой не менее 3 м, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, либо при наличии условий для интенсивного проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократный воздухообмен за время не более 15 мин.

Стены и потолок в помещениях, оборудованных облучателями открытого типа, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению (далее - УФ-излучение).

Облучатели открытого типа предназначены для обеззараживания помещений только в отсутствие людей или при их кратковременном пребывании в помещении, должны иметь акт о вводе в эксплуатацию.

Облучатель должен включаться в розетку, имеющую заземленный контакт. При колебаниях напряжения сети выше или ниже 10% от номинального значения эксплуатация бактерицидного облучателя не допускается. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться только после отключения прибора от питающей сети.

Очистка от пыли поверхности отражателя и колбы лампы, а также замена ламп должна осуществляться ежемесячно (при отключенном облучателе).